



Czyste ręce ratują życie!

HGP230 Hygienius ProWash

Wstępnie ustawiony cykl mycia został opracowany zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia "Czyste ręce chronią przed zakażeniami", co pozwoliło na bardzo wydajne użycie wody.

Hygienius
ProWash można
podłączyć do
dowolnego gniazda
13 A

Doskonały do placówek
medycznych i zakładów
opieki.



Kliknij tutaj, aby
zamówić online -
lub odwiedź

www.mobilneumywalki.pl

Hygienius ProWash jest całkowicie autonomiczny i nie wymaga żadnej instalacji wodociągowej ani odprowadzeń kanalizacyjnych.

Ustawiony wstępnie program mycia rąk

Cykl mycia/płukania ProWash został opracowany zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia "Czyste ręce chronią przed zakażeniami".

Aby rozpocząć program mycia czasowego:

1. Należy umieścić dłonie przed zielonym czujnikiem Greensensor, który zacznie migać.
2. Woda popłynie przez 4 sekundy, aby umożliwić zwilżenie rąk.
3. Woda przestanie płynąć na 20 sekund, aby umożliwić nałożenie mydła w płynie i wykonanie procedury mycia rąk metodą 9 kroków.
4. Ciepła woda płynie przez 10 sekund, aby umożliwić spłukanie mydła z rąk
5. Całkowity czas mycia wynosi około 35 sekund.

Cechy Hygienius ProWash:

- Bezdotykowe uruchamianie ciepłej bieżącej wody.
- Woda zawsze w optymalnej temperaturze 36/40°C.
- Bardzo mobilne - Hygienius ProWash można podłączyć do dowolnego gniazda 13 A.
- Nic nie trzeba zmieniać ani regulować - prosta rutynowa codzienna higiena.
- Wysokowydajne zużycie wody - do 40 cykli 10-sekundowych myć na jedno napełnienie.
- Urządzenie wyposażone jest w łatwy w użyciu zbiornik TEALTainer, który zapewnia oddzielne i higieniczne przechowywanie czystej i brudnej wody.

Specyfikacja


- Całkowita wysokość 990 mm
- Wysokość do umywalki 900 mm
- Szerokość 330 mm
- Waga (bez wody) 7,6 kg
- Zasilanie 230 V.

Construction

- Korpus jest w całości wykonany z niebieskiego, trwałego polietylenu.
- Umywalka jest z płyty ABS pokrytej białym akrylem.
- W komplecie z wbudowaną wtyczką 13 A.
- TEALTainer II pozwala bezpiecznie przechować zużyta wodę w osobnym, ciężkim opakowaniu etylenowym LLDPE o pojemności 10 l.

W zestawie z Pro Wash

- TEALTainer II zbiornik na wodę.
- Uchwyt ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe.
- Uchwyt typu "C" do dozownika mydła TEAL.
- Opcjonalne dodatki: dozownik na mydło ze stali nierdzewnej uchwyt typu "Z".

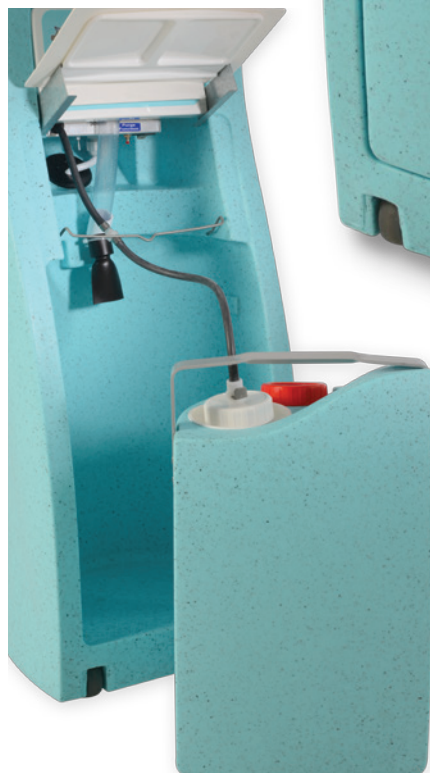

Kliknij tutaj, aby
zamówić online -
lub odwiedź
www.mobilneumywalki.pl



Elmiko Medical sp. z o.o.

A: Poleczki 29, 02-822 Warszawa, PL

T: +48 (22) 855 30 79

F: +48 (22) 855 34 97

E: marcin.sliwa@elmiko.pl

W: www.elmiko.pl